



Inštrukcie na používanie



Slovensky

Rýchly test skríningu symptómov Corowell COVID-19

Užívateľská príručka v1.0

MKG Consulting UG
Hauptstrasse 96
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Nemecko

Telefon: +49 2641 908 28 74
E-Mail: info@corowell.com

1 Aplikácie

Rýchly test na skrining symptómov Corowell COVID-19 je určený na zisťovanie straty čuchu (anosmie) u používateľov, na kontrolu odpovedí používateľa na otázky z integrovaného dotazníka a na vydanie elektronického pasu s menom. Cieľovou populáciou sú dospelí starší ako 18 rokov alebo deti, ktoré test vykonávajú pod dohľadom rodičov.

2 Kontraindikácie

- ❑ Žiadne

3 Pokyny

Pred prvým použitím rýchleho testu na skrining symptómov Corowell COVID-19 si prečítajte tento návod.

3.1 Varovania

- ❑ Rýchly test na skrining symptómov Corowell COVID-19 bol vyvinutý a testovaný na použitie jedným používateľom. Rýchly test na skrining symptómov Corowell COVID-19 nepoužívajte s inými ľuďmi, ale iba osamote. Rovnakú aplikáciu však môžete použiť na testovanie viacerých používateľov za sebou.
- ❑ Neuchovávajte lístky Corowell blízko vody alebo na vlhkých miestach.

3.2 Preventívne opatrenia

- ❑ Žiadne

4 Všeobecné funkcie

Corowell Symptom Rapid Test System je navrhnutý tak, aby podporoval používateľa počas procesu, aby sa mohol užívateľ úspešne testovať doma alebo v teréne.

The Corowell Symptom Rapid Test System sa skladá

- ❑ Aplikácia Corowell (iOS a Android)
- ❑ Corowell lístok



Obrázok 1 poskytuje prehľad komponentov systému Corowell Symptom Rapid Test System:

5 Používanie systému Corowell

Podrobné použitie systému Corowell je popísané v nasledujúcich kapitolách.

5.1 Prvé načítanie aplikáčného softvéru

Používateľ si môže prvýkrát stiahnuť softvér aplikácie do smartfónu používateľa

Vyhľadajte Corowell v príslušnom obchode App Store / Google Store a odtiaľ si aplikáciu stiahnite a nainštalujte.

Na zadnej strane lístka Corowell naskenujte QR kód, ako je to znázornené na obrázku 2.


Odtiaľ je používateľ presmerovaný do App Store a môže si stiahnuť a nainštalovať softvér aplikácie bez toho, aby musel hľadať.

Naskenujte tento QR kód a stiahnite si aplikáciu



5.2 Úvodné obrazovky

Pri prvom otvorení testu sa zobrazia nasledujúce obrazovky, ktoré slúžia ako úvod do skríningového testu. Zobrazia sa iba pri prvom otvorení aplikácie a nie neskôr (obrázok 3)

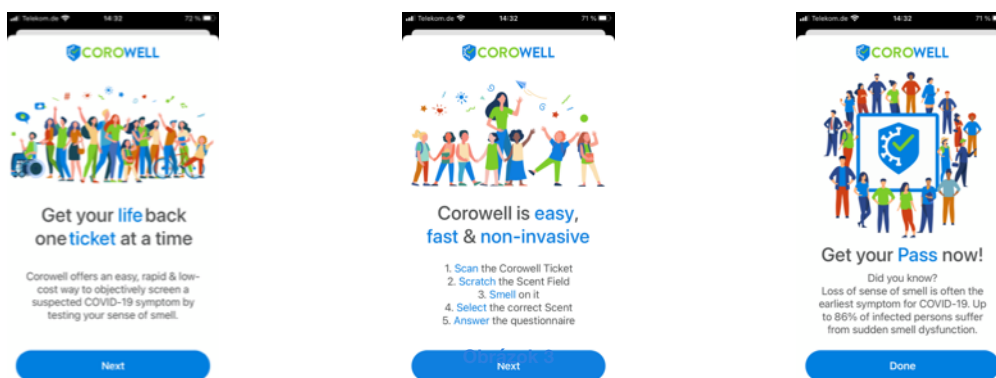

5.3 Obrazovka skenovania lístkov

Po úvodných obrazovkách sa zobrazí „Obrazovka skenovania vstupeniek“. Najskôr musíte aplikácii povoliť prístup k fotoaparátu (obrázok 4).



Obrázok 4

5.4 Výber jazyku


Pri prvom spustení aplikácie Corowell softvér automaticky použije obrazovku pre výber jazyka nastavenú vo vašom smartfóne. Toto môžete kedykoľvek zmeniť v nastaveniach (obrázok 4).

5.5 Skenovanie lístkov

Ak chcete zakaždým naskenovať nový lístok, musíte najskôr opatrne otvoriť nalepený lístok a potom pomocou aplikácie naskenovať QR kód na vnútornej strane (obrázok 5). Urobíte to tak, že jednoducho stlačíte znamienko „+“ na modrej lište v dolnej časti obrazovky skenovania (obrázok 6).



Obrázok 5

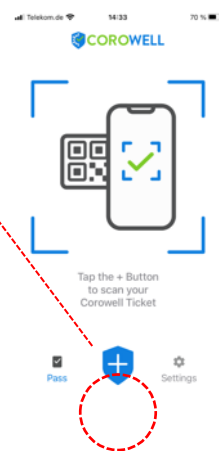


Obrázok 6

5.6 Vyberte vonnú obrazovku

Po naskenovaní QR kódu na vnútornej strane tiketu sa otvorí obrazovka pre výber zápachu (Obrázok 7). Tam musíte zvoliť vôňu, ktorú ste zistili na ploche zelenej vône (obrázok 5) „po“ poškríbaní nechtom alebo mincou.


Potom kliknite na tlačidlo „Potvrdiť“ v dolnej časti obrazovky (obrázok 7).

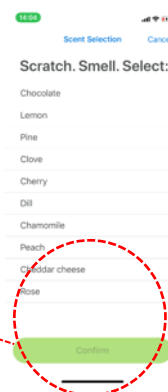

Obrázok 7

5.7 Obrazovka dotazníka COVID-19

Sedem (7) otázok tu musí zodpovedať VŠETKO pravdivo (obrázok 8). Iba ak ste na VŠETKY otázky odpovedali ÁNO alebo NIE a posuvník bol zodpovedajúcim spôsobom upravený, môžete pokračovať kliknutím na Potvrdiť.

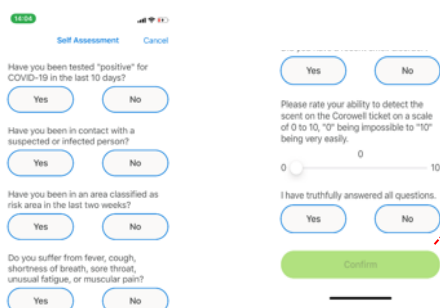


Obrázok 8

5.8 Zadajte meno a ochranu údajov

Ďalej sa otvorí obrazovka, ako je to znázornené na obrázku 9, kde musíte zadať svoje meno (alebo meno osoby, ktorá skutočne vykonala test, napr. Vaše deti).

To je veľmi dôležité, pretože neskôr, keď predložíte svoj Corowell PASS na overenie treťou stranou, môžete byť požiadaní o svoje ID na potvrdenie vašej totožnosti.

Musíte tiež prijať zásady ochrany osobných údajov, ktoré si môžete kedykoľvek podrobne prečítať buď prostredníctvom odkazu (obrázok 9), alebo v nastaveniach.

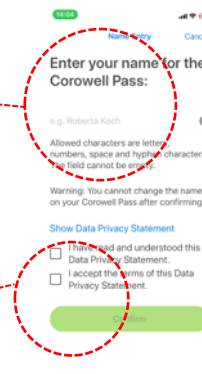

Obrázok 9

5.9 Obrazovka Corowell PASS


Ak ste „absolvovali“ test skrínungu príznakov COVID-19, otvorí sa obrazovka Corowell PASS (Obrázok 10). Tu uvidíte meno, ktoré ste zadali skôr, a dátum a čas uskutočnenia testu. Je to potrebné, aby pri testovaní vášho Corowell PASS treťou stranou bol dôležitý čas a dátum, kedy ste prešli.

Prevádzkovatelia hotelov, reštaurácií, leteckých spoločností atď. Budú akceptovať iba preukazy Corowell, ktoré nie sú staršie ako 6, 12, 24, 48 alebo 72 hodín. Tieto kritériá prijatia vám budú oznámené na mieste.



Obrázok 10


5.10 Corowell ZLYHANIE obrazovky

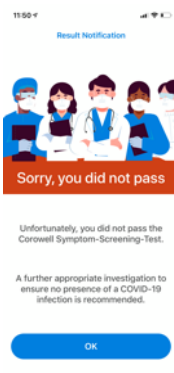

Ak ste neprešli testom Corowell, zobrazí sa táto obrazovka. Ak máte dojem, že ste „iba“ niečo pokazili, test môžete vždy zopakovať s novým lístkom. Ak skutočne necítite vôňu alebo ak ste odpovedali ÁNO na jednu z prvých 5 otázok alebo NIE na poslednú otázku, odporúčame vám, aby ste sa nechali vyšetriť zdravotníckym pracovníkom na možnú infekciu COVID-19.

6 Chybové hlásenie „Je nám ľúto, nemôžeme spracovať váš lístok“

Táto obrazovka (Obrázok 11) sa objaví, ak sa pokúsíte použiť svoj lístok druhýkrát alebo ak máte kópiu alebo falošný originálny lístok spoločnosti Corowell.

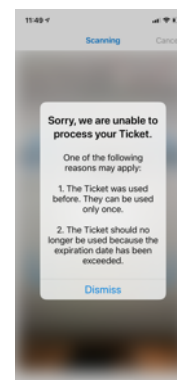


Obrázok 11

7 Nastavenia

V nastaveniach (Obrázok 12) môžete otvoriť túto používateľskú príručku a prečítať si často kladené otázky.

Nájdete tu tiež zásady ochrany osobných údajov (vo vašom príslušnom jazyku) a môžete navštíviť našu webovú stránku corowell.com.

V poli „Informácie“ nájde oficiálna zdravotnícka pomôcka informácie o našom produkte (obrázok 13).

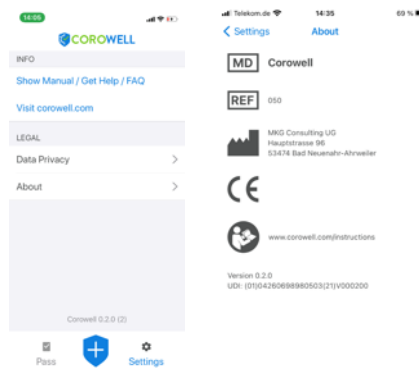

Obrázok 12

Obrázok 13

8 Servis a záruka












Ponúkame vám komplexnú globálnu záručnú ochranu, ktorá nadobúda účinnosť dňom zakúpenia. Požiadajte svojho predajcu o podrobnosti a záručnú dobu. Táto záruka sa vzťahuje na všetky chyby materiálu alebo vyhotovenia.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním alebo starostlivosťou, vystavením chemikáliám, ponorením do vody alebo nesprávnym vystavením. Poškodenie spôsobené tretími stranami alebo neautorizovanými servisnými strediskami vedie k zrušeniu platnosti záruky.

9 Symboly

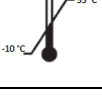

Vo vyššie uvedených informáciách sú použité rôzne symboly. Nižšie sú vysvetlené tieto dôvody:

	Meno Modelu
	Referenčné číslo
	Sériové číslo
	Dátum výroby
	Výrobca
	Udržujte suché
	Na jedno použitie
	Chráňte pred slnečným žiarením
	Teplotné limity
	Pozri návod na použitie
	Certifikácia CE značky